

Verarbeitungsanleitung

SEPERATE + SEPERATE *GLANZ*



SEPERATE und SEPERATE *Glanz* ist eine Isolierung Gips gegen Gips. Gleichzeitig erhalten Sie mit SEPERATE *Glanz* ein Veredlungsmittel für glänzende und versiegelte Gipsoberflächen.

Verarbeitung:

SEPERATE gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen.

Überschuss unter fließendem Wasser abspülen oder mit Papiertuch absaugen.

Für die Oberflächenveredelung mit SEPERATE *Glanz* das Modell einsprühen und dann mit einer weichen Zahnbürste polieren.

Anschließend einfach mit Wasser absprühen und mit einem Tuch trocken reiben.

Vorteile:

- ☺ Hervorragende Isolierung – leichtes Trennen der Gipse
- ☺ Schnelle und unkomplizierte Oberflächenveredelung der Gipsmodelle (SEPERATE *Glanz*)
- ☺ Keinerlei Film- oder Schichtbildung – also glatte, saubere Gipsoberflächen