

# Verarbeitungsanleitung

## **ESM**



ESM ist ein universell einsetzbares Entspannungsmittel. Es ist Tensid- und Alkoholfrei. Dadurch entstehen auf Abformungen keine Rückstände von Tensiden, die den Gips oder die Einbettmasse nicht aushärten lassen. Ebenfalls kann durch den Verzicht auf Alkohol zugesichert werden, dass sich Abformungen nicht deformieren und oder zersetzt werden.

### **Verarbeitung:**

ESM eignet sich für alle Abformmaterialien und Wachsmodellationen. Vor der Anwendung bei Abformungen muss diese gereinigt, desinfiziert und gut ausgespült werden.

ESM gleichmäßig dünn aufsprühen. Die überschüssige Flüssigkeit abtropfen lassen und den Abdruck ausschlagen oder vorsichtig mit dosiertem Druck trocken blasen. Gleiches gilt für Wachsobjekte wobei diese ausschließlich trockengeblasen werden.

Nun gießen Sie Ihren Abdruck in gewohnter Weise aus, bzw. betten Ihr Wachsobjekt ein.

Eine leicht feuchte Oberfläche beeinträchtigt den Gips oder die Einbettmasse nicht.

Eine Pfützenbildung sollte aber auf jeden Fall vermieden werden.

### **Vorteile:**

- ☺ Hervorragendes anfließen des Gipses und der Einbettmasse
- ☺ Scharf wiedergegebene Oberflächendetails (wie z.B. Kanten)
- ☺ Blasenfreie Oberflächen