



INTRA/ *INTRA extra

Spezial Artikulationsgips

nach DIN EN 26873

Die Verarbeitung :

- 1. Wasser** (vorzugsweise destilliert) **30 ml auf 100 gr. vorlegen.**
Beste Verarbeitungstemperatur 21°C – 23°C.
- 2. Gut von Hand durchspateln.** (Aufgrund neuer Rezeptur unbedingt nötig)
- 3. Mischdauer 30 sec. Maschinell unter Vakuum.**
Oder Manuell 60 sec.
- 4. Verarbeitungszeit ca. 3 min./*ca. 1,5 min.**
Bitte beachten Sie unbedingt, dass nach der angegebenen Verarbeitungszeit der Gipsbrei keinesfalls mehr vibriert werden darf. Dies führt zu einer Zerstörung im Kristallgefüge des Gipses.
- 5. Weiterbearbeitung – z.B. öffnen des Artikulators nach 4,5 min.**
***3 min.**

Die Weiterverarbeitung des Modells richtet sich nun nach Ihrem Bedarf.

Anwendungsbereich: Artikulationen aller Art, Vorwälle.

WARNUNG

Alle Gipsmodelle, unabhängig vom Gipshersteller oder –lieferanten sind grundsätzlich empfindlich gegen Abbrühen und Abdampfen!

Technische Daten

Brinellhärte nach 2 h:	25 MPa
Brinellhärte nach 24 h:	30 MPa
Expansion nach 24 h:	unter 0,04 %
Verarbeitungstemperatur:	21°C – 23°C